

Avertissements :

N'utilisez pas Instalife® sur les deux jambes en même temps.

N'utilisez pas Instalife® sans avoir consulté auparavant votre médecin.

Instalife® devrait être fermement serré mais pas de façon inconfortable. Desserrez un peu s'il vous gêne mais en le maintenant serré.

Instalife® ne doit initialement pas être porté plus de 2 heures la première fois. Si vous vous sentez bien avec Instalife®, vous pouvez le porter pendant des laps de temps plus longs (maximum : 8h).

Ne pas le porter durant la nuit.

Certaines personnes peuvent être allergiques au néoprène. Si une éruption apparaît sur votre peau, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.

Si, en utilisant le produit, vous sentez une gêne dans la jambe ou si la douleur de dos persiste ou augmente, cessez d'utiliser Instalife® et consultez votre médecin.

Important : Par mesure d'hygiène et par mesure de précaution si vous êtes sujet aux allergies, lavez le produit avant la première utilisation.